

GlideComfort

De GlideComfort is een ergonomisch en economisch verantwoord transfer-hulpmiddel, met name bedoeld voor gebruik bij cliënten met incontinentie-problematiek. De cliënt wordt op een comfortabele en veilige manier verplaatst met een minimale fysieke belasting voor de zorgverleners. De cliënt kan met behulp van de GlideComfort gemakkelijk behandeld of verplaatst worden d.m.v. de handvatten.

**Toepasbaar in:**

Ziekenhuizen en instellingen.

Afmeting

100 x 118 centimeter.

Materialen:

Non-woven polyester

Trilibol polyester

Polyurethaan



Voordelen:

- * Vermindert fysieke belasting voor de zorgverleners.
- * Efficiënter werken. Tijdswinst, de GlideComfort blijft onder de cliënt liggen.
- * Ergonomisch, bedoeld voor zijwaartse transfers.
- * Economisch, kostenbesparend: Er zijn geen onderleggers of extra onderlagen nodig.
- * Incontinentiebestendig: kan tot 3 liter/m² absorberen.
- * Door de structuur van de GlideComfort zal de cliënt minder wegglijden als de ruginstelling omhoog staat.
- * De cliënt zal minder pijn ervaren door verminderde schuifkrachten tijdens transfers.
- * Handvatten aan elke kant voor een stevige en veilige grip.
- * De cliënt kan op een comfortabele en veilige manier verplaatst worden.

Kenmerken:

- * De bovenlaag bestaat uit meerdere lagen voor het absorberen van vloeistof/urine in combinatie met een glijzeil en handvatten om de handelingen uit te voeren.
- * Voor het verplaatsen van cliënten tot 200 kg.
- * Plaats de witte gladde kant onder, het licht blauwe absorberende materiaal aan de bovenkant, de cliënt ligt rechtstreeks op de licht blauwe zijde van de GlideComfort.
- * De GlideComfort wordt rechtstreeks op het (hoes)laken van het matras gelegd.
- * Zorg ervoor dat de GlideComfort onder de schouders en heupen wordt geplaatst zodat de cliënt gemakkelijk verschoven kan worden zonder dat er schuifkrachten ontstaan.
- * Wanneer de cliënt onrustig is, wordt het sterk aangeraden om de onrusthekken te gebruiken, ook tijdens de transfermomenten.

Wasinstructie:

- * U kunt de GlideComfort wassen tot 80°C.
- * **LET OP!!** Om blijvende vlekken door bloed of ontlasting te voorkomen adviseren we om **maximaal tot 60°C te wassen.**
- * Geen bleekmiddelen, wasverzachters of andere chemische additieven gebruiken.
- * Drogen kan tot 40°C.
- * Niet samen wassen met producten die klittenband of metalen onderdelen bevatten.



Voorzichtig
wassen



Drogen
toegestaan



Niet
bleken



Niet
strijken



Niet droog
reinigen

LET OP!:

- * Niet te gebruiken bij schade aan de GlideComfort.
- * Maximum gewicht cliënt: 200 kg.
- * Bij voorkeur met 2 zorgverleners werken.
- * De GlideComfort niet vastmaken aan tilliften!

