

Absorberend hooslaken

Het absorberend hooslaken is een hulpmiddel dat speciaal ontwikkeld is voor cliënten die hun incontinentiemateriaal uittrekken en/of van bed verwijderen. Door middel van de lange katoenen instopstrook en een sterk elastiek past het hooslaken goed om het matras. Het hooslaken wordt hierdoor geaccepteerd als normaal hooslaken en er ontstaat minder plooivorming.

Door het absorptievermogen wordt de cliënt niet of minder nat en de huid zal minder snel verweken. Het hooslaken is vervaardigd van een comfortabele stof, een rustig uiterlijk en is geheel matras omsluitend.



Artikel nummer

Afmetingen

UDI-DI

9532	85/90 x 200	8720938265310
9533	85/90 x 210	8720938265327

Materialen

Katoen, Non-woven polyester,
Trilibol polyester, Polyurethaan



Scan voor
instructievideo

Voordelen:

- *Vermindert fysieke belasting: Minder verschoonmomenten.
- *Efficiëntie: Tijdwinst door minder verschoonmomenten.
- *Economisch: Geen andere incontinentiematerialen nodig.
- *Duurzaam: Het laken kan 300 keer gewassen worden
- *Doeltreffend: Laken absorbeert 4.5 liter. per m² waardoor de huid droog blijft.
- *Aansluiting: De hoes sluit strak aan rondom het matras.

Kenmerken:

- *De toplaag ligt erg comfortabel.
- *Plaats het witte incontinentie stof aan de bovenkant, de cliënt ligt rechtstreeks op de witte zijde van het hoeslaken.
- *Binnenste lagen houden het vocht vast.
- *Buitenste lagen absorberen het vocht.

Wasinstructie:

- *U kunt het hoeslaken wassen tot 60° C.
- *Geen bleekmiddelen, wasverzachters of andere chemische additieven gebruiken.
- *Drogen kan tot 40° C.
- *Niet samen wassen met producten die klittenband of metalen onderdelen bevatten.
- *Voor optimale absorptie van het hoeslaken, eerst een keer wassen voor gebruik.

Opslag, Behandeling, Verwijdering:

- *Het product moet opgeslagen worden buiten het bereik van zonlicht en hoge vochtigheid.
- *Afgeschreven lakens uitsluitend afvoeren op de daarvoor bestemde plaatsen.
- *Lees voor gebruik altijd de gebruiksaanwijzing.



LET OP!!

- *Na wassen een keer extra centrifugeren.
- *Incontinentie stof droogt langzaam, daarom aangeraden om een set (2 stuks) aan te schaffen.
- *Niet te gebruiken bij schade aan het hoeslaken.



Gebruik NOOIT een defect product!



Fabrikant:
Fico Belgium BVBA
Senator A. Jeurissenlaan 1154 Bus 6
3520 Zonhoven | Belgium