

INCOGLIDE®

De IncoGlide XL is een incontinentie laken dat maar liefst 3 liter vocht per m² kan absorberen en met name is bedoeld voor cliënten met zwaardere incontinentie problematiek. Door het 5-lagen systeem is het mogelijk om het vocht binnen de 5 lagen te absorberen waarbij de boven- en onderkant er voor zorgen dat vocht niet terug uit het laken kan lekken. Doordat de huid droger blijft zal deze niet week worden. Een intacte huid is sterker en voorkomt infecties.



Artikelnummer:

3212

Afmeting:

120 x 140 centimeter

UDI-DI:

UDI-DI: 08720938265280

Materialen:

Non-woven polyester,
Trilibol polyester, Polyurethaan



Scan voor
instructievideo

Voordelen:

- * Vermindert fysieke belasting voor de zorgverleners.
- * Efficiënter werken. Tijdswinst, de IncoGlide XL blijft onder de cliënt liggen.
- * Ergonomisch, bedoeld voor zijwaartse transfers.
- * Economisch, kostenbesparend: Er zijn geen onderleggers of extra onderlagen nodig.
- * Incontinentiebestendig: kan tot 3 liter/m² absorberen.
- * Door de structuur van de IncoGlide XL zal de cliënt minder wegglijden als de ruginstelling omhoog staat.
- * De cliënt zal minder pijn ervaren door verminderde schuifkrachten tijdens transfers.
- * Handvatten aan elke kant voor een stevige en veilige grip.
- * De cliënt kan op een comfortabele en veilige manier verplaatst worden.

Kenmerken:

- * De incostof bestaat uit meerdere lagen voor het absorberen van vloeistof/urine in combinatie met een glijzeil en handvatten om de handelingen uit te voeren.
- * Voor het verplaatsen van cliënten tot 200 kg.
- * Plaats de witte gladde kant onder, het lichtblauwe incomateriaal aan de bovenkant, de cliënt ligt rechtstreeks op de lichtblauwe zijde van de IncoGlide XL.
- * De IncoGlide XL wordt rechtstreeks op het (hoes)laken van het matras gelegd.
- * Zorg ervoor dat de IncoGlide XL onder de schouders en heupen wordt geplaatst zodat de cliënt gemakkelijk verschoven kan worden zonder dat er schuifkrachten ontstaan.
- * Wanneer de cliënt onrustig is, wordt het sterk aangeraden om de onrusthekken te gebruiken, ook tijdens de transfermomenten.

Wasinstructie:

- * U kunt de IncoGlide XL wassen tot 80° C.
- * **LET OP!!** Om blijvende vlekken door bloed of ontlasting te voorkomen adviseren we om **maximaal tot 60°C te wassen**.
- * Geen bleekmiddelen, wasverzachters of andere chemische additieven gebruiken.
- * Drogen kan tot 40°C.
- * Niet samen wassen met producten die klittenband of metalen onderdelen bevatten.

Opslag, Behandeling, Verwijdering:

- * Het product moet opgeslagen worden buiten het bereik van direct zonlicht en een hoge vochtigheid. Tijdens opslag en gebruik scherpe voorwerpen Het product niet weggooien in de natuur buiten de daar voor voorziene plaatsen. Lees voor gebruik altijd de gebruiksaanwijzing.



LET OP!!:

- * Niet te gebruiken bij schade aan de IncoGlide XL.
- * Maximum gewicht cliënt: 200 kg.
- * Bij voorkeur met 2 zorgverleners werken.
- * De IncoGlide XL niet vastmaken aan tilliften!



Gebruik NOOIT een defect product!



Fabrikant:
GENTUG TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. VE
TİC. A.Ş. Savas Caddesi, Soğut Sokak
No:1 34173 Merter, İstanbul, Türkiye