


Hielring 3D-stof

De hielring is bedoeld voor cliënten die risico lopen op hieldecubitus of al wonden hebben. De hielring zorgt ervoor dat de hiel geheel vrij wordt gelegd van het oppervlak, hierdoor is het mogelijk om de druk volledig weg te halen op de hiel. Door de klittenband sluiting is de hielring in te stellen en passend te maken rondom het onderbeen.

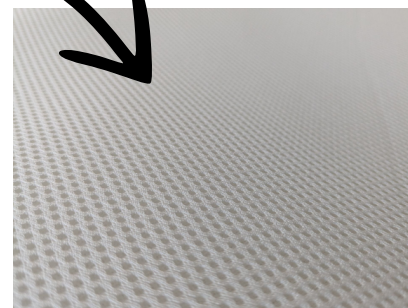

Artikel nummer	Afmetingen	UDI-DI
2326	Ø 23 cm	8720938265334

Materialen

3D-stof (100% polyester)
Dryfeel-schuim



8 720938 265334



Scan voor
productpagina

Voordelen:

- *Legt de enkel en hiel vrij in verschillende houdingen.
- *De 3D-hielring droogt snel na het wassen.
- *De 3D-hielring is luchtdoorlatend, hierdoor voelt hij niet warm aan.
- *Het dryfeel-schuim zorgt voor een comfortabel gevoel.
- *De 3D-hielring is verstelbaar door het klittenband.

Kenmerken:

- *De hielring is luchtdoorlatend en ademend.
- *De hielring kan in zijn geheel in de wasmachine.
- *De hielring droogt snel na het wassen.
- *Het klittenband zorgt voor een stevige bevestiging.

Wasinstructie:

- *U kunt de hielring op 60 graden wassen.
- *Geen bleekmiddelen, wasverzachters of andere chemische additieven gebruiken.
- *Drogen kan op een lage temperatuur.
- *Niet samen wassen met producten die klittenband of metalen onderdelen bevatten.
- *Het product kan in zijn geheel gewassen worden.

Opslag, Behandeling, Verwijdering:

- *Het product moet opgeslagen worden buiten het bereik van direct zonlicht en een hoge vochtigheid. Het product niet weggooien in de natuur buiten de daar voor voorziene plaatsen. Lees voor gebruik altijd de gebruiksaanwijzing.



Normaal
wassen



Drogen
toegestaan



Niet
bleken



Niet
strijken



Niet droog
reinen

LET OP!!

- *Niet te gebruiken bij schade aan de hielring.
- *Tijdens het wassen het klittenband sluiten.



**Gebruik NOOIT een
defect product!**



Fabrikant:
Fico Belgium BVBA
Senator A. Jeurissenlaan 1154 Bus 6
3520 Zonhoven | Belgium