

INCOGLIDE®

De IncoGlide is een incontinentie laken dat maar liefst 3 liter vocht per m² kan absorberen en met name is bedoeld voor cliënten met zwaardere incontinentie problematiek. Door het 5-lagen systeem is het mogelijk om het vocht binnen de 5 lagen te absorberen waarbij de boven- en onderkant er voor zorgen dat vocht niet terug uit het laken kan lekken. Doordat de huid droger blijft zal deze niet week worden. Een intacte huid is sterker en voorkomt infecties.



Artikelnummer:

3211

Afmeting:

100 x 140 centimeter

UDI-DI:

UDI-DI: 08720938265044

Materialen:

Non-woven polyester,
Trilibol polyester, Polyurethaan



Voordelen:

- * Vermindert fysieke belasting voor de zorgverleners.
- * Efficiënter werken. Tijdswinst, de IncoGlide blijft onder de cliënt liggen.
- * Ergonomisch, bedoeld voor zijwaartse transfers.
- * Economisch, kostenbesparend: Er zijn geen onderleggers of extra onderlagen nodig.
- * Incontinentiebestendig: kan tot 3 liter/m² absorberen.
- * Door de structuur van de IncoGlide zal de cliënt minder wegglijden als de ruginstelling omhoog staat.
- * De cliënt zal minder pijn ervaren door verminderde schuifkrachten tijdens transfers.
- * Handvatten aan elke kant voor een stevige en veilige grip.
- * De cliënt kan op een comfortabele en veilige manier verplaatst worden.

Kenmerken:

- * De incostof bestaat uit meerdere lagen voor het absorberen van vloeistof/urine in combinatie met een glijzeil en handvatten om de handelingen uit te voeren.
- * Voor het verplaatsen van cliënten tot 200 kg.
- * Plaats de witte gladde kant onder, het lichtblauwe incomateriaal aan de bovenkant, de cliënt ligt rechtstreeks op de lichtblauwe zijde van de IncoGlide.
- * De IncoGlide wordt rechtstreeks op het (hoes)laken van het matras gelegd.
- * Zorg ervoor dat de IncoGlide onder de schouders en heupen wordt geplaatst zodat de cliënt gemakkelijk verschoven kan worden zonder dat er schuifkrachten ontstaan.
- * Wanneer de cliënt onrustig is, wordt het sterk aangeraden om de onrusthekken te gebruiken, ook tijdens de transfermomenten.

Wasinstructie:

- * U kunt de IncoGlide wassen tot 80° C.
- * **LET OP!!** Om blijvende vlekken door bloed of ontlasting te voorkomen adviseren we om **maximaal tot 60°C te wassen.**
- * Geen bleekmiddelen, wasverzachters of andere chemische additieven gebruiken.
- * Drogen kan tot 40°C.
- * Niet samen wassen met producten die klittenband of metalen onderdelen bevatten.



LET OP!!:

- * Niet te gebruiken bij schade aan de IncoGlide.
- * Maximum gewicht cliënt: 200 kg.
- * Bij voorkeur met 2 zorgverleners werken.
- * De IncoGlide niet vastmaken aan tilliften!



Fabrikant:
DecoCare
Aphroditestraat 21
5047 TW Tilburg